

## AKTIVNA ALUMINIJSKA KOLICA S VELIKIM KOTAČIMA

Oznaka: **ACTIV TIM**

### Upute za korištenje



#### 1. OPIS

Invalidska kolica izrađena su od laganih aluminijskih naslona za ruke i opcionalne odvojive presvlake od prozračnog mrežastog materijala. Zahvaljujući podešavanju težišta sprijeda, prilagođavaju se individualnim potrebama korisnika. To je mehanizam, kočnice za pomoćnike, sigurnosni pojas/strap dostupan je u verziji s kotačima od 16", 22" ili 24" kotačima.

Set uključuje: okvir invalidskih kolica s ključevima za montažu.

Dodatna oprema: kotači protiv prevrtanja, jastuk za sjedenje i za leđa



1. Rukohvat
2. Pomoćna kočnica
3. Mehanizam za preklapanje naslona
4. Naslon za ruke
5. Parkirna kočnica (ručna kočnica)
6. Obruč za ruke
7. Mehanizam za brzo otpuštanje
8. Ploča za noge
9. Podešavanje težišta
10. Kotač protiv prevrtanja
11. Funkcija podizanja naslona za ruke
12. Naslon za leđa
13. Sjedalo sa sigurnosnim pojasom
14. Ručica oslonca za noge
15. Čvrsti, stražnji kotač od 24"\*
16. Čvrsti, prednji kotač od 8"

#### 2. PRIMJENA

Invalidska kolica su dizajnirana za osobe koje se kreću i za pacijente s disfunkcijama. Invalidska kolica s pogonom mogu se gurati i imaju mogućnost podešavanja postavki, pružaju bolju kontrolu, a korisnici imaju veći osjećaj udobnosti u svakodnevnoj vožnji. Prikladna su za korištenje unutaršnjim i vanjskim prostorima.

#### 3. SASTAVLJANJE

##### Korak 1. Rasklapanje invalidskih kolica

Postavite invalidska kolica na podlogu. Rasklopite kolica na način uhvatite naslone za ruke i potegnete. Zatim pritisnite središte sjedala tako da se svi elementi poravnaju i spoje.

##### Korak 2. Naslon i sjedalo

Podignite naslon prema gore i zaključajte ga bravama za naslon koje se nalaze ispod ručki. Pričvrstite presvlaku na invalidska kolica.

##### Korak 3. Oslonci za noge

Pričvrstite oslonac za noge na vanjsku stranu okvira. Zatim okrenite oslonac za noge prema unutra dok se ne zaključa. dok se ne zaključa.

##### Korak 4. Nasloni za ruke

Naslone za ruke se mogu naginjati. Za podizanje naslona za ruke pritisnite gumb koji se nalazi na okviru (ispod naslona za ruke) invalidskih kolica.

##### Korak 5. Podešavanje visine oslonaca za noge

Podesite oslonce za noge pomoću vijka koji se nalazi na cijevi. Treba ostaviti dovoljno prostora između podnožja i tla, jer prenisko postavljene podnožja mogu uzrokovati poteškoće pri penjanju uzbrdo i rubnike. Podesite podnožja tako da kut između trupa i bedara bude 90° (optimalni položaj sjedenja za korisnika).

##### Korak 6. Sastavljanje sigurnosnih remena

Pričvrstite sigurnosne remene na oslonce za noge kako biste spriječili klizanje nogu korisnika niz ploče za noge.

#### 4. KORIŠTENJE KOLICA

##### 4.1 KONTROLA PRIJE UPOTREBE

##### Korak 1. Provjera stanja invalidskih kolica

Provjerite stanje kočnica, konstrukcije i guma. Provjerite jesu li sve komponente pravilno sastavljene i podešene.

**Napomena!** Nemojte koristiti invalidska kolica ako primijetite bilo kakve nedostatke.

##### Korak 2. Korištenje parkirnih kočnica

Blokirajte kotače prilikom ulaska ili izlaska iz invalidskih kolica.

##### Korak 3. Podnožja

Podnožja trebaju biti postavljena u okomiti položaj prilikom ulaska ili izlaska iz invalidskih kolica. Nemojte koristiti podnožja kao oslonac prilikom ulaska ili izlaska iz invalidskih kolica zbog rizika od pada. Nakon prelaska na invalidska kolica, rasklopite podnožja.

**Napomena!** Nemojte stajati na podnožjima zbog rizika od oštećenja.

##### Korak 4. Ulazak u invalidska kolica

Invalidska kolica trebaju biti smještena što bliže pacijentu. Trebaju dodirivati krevet ili drugo sjedalo koje se koristi. Ako korisnik ne može samostalno promijeniti sjedalo, prebacite ga u invalidska kolica.

##### Korak 5. Položaj korisnika

Korisnik treba sjediti u uspravnom položaju, a koljena trebaju biti savijena pod kutom od 90°.

##### Invalidska kolica su spremna za upotrebu!

##### 4.2 SKLAPANJE

Invalidska kolica se mogu ponovno sklopiti radi lakšeg transporta i skladištenja.

- Zakrenite podnožje i postavite ga u okomiti položaj.
- Odvojite presvlaku.
- Pomoću ručki podignite sjedalo prema gore dok se okvir invalidskih kolica ne sklopi.
- Za sklapanje naslona, istovremeno pritisnite elemente za zaključavanje koji se nalaze ispod ručki na stražnjoj strani naslona i povucite naslon prema dolje.

### 4.3 PARKIRNA KOČNICA

Za blokiranje kotača, gurnite polugu prema naprijed dok se kotač potpuno ne blokira (odvojeno za lijevi i desni kotač). Imajte na umu da parkirna kočnica služi samo za blokiranje kotača kada se invalidska kolica potpuno zaustave.

### 4.4 PODEŠAVANJE PARKIRNE KOČNICE

Ispravno funkcioniranje parkirne kočnice ovisi o njezinom podešavanju i položaju. Treba je montirati na odgovarajućoj udaljenosti od stražnjeg kotača, tako da je čvrsto blokirana i da poluga ne nailazi na preveliki otpor.

- U slučaju prevelikog otpora, pomaknite parkirnu kočnicu prema naprijed pomoću vijaka za blokiranje. Postavite parkirnu kočnicu u položaj koji omogućuje lako blokiranje kotača bez prevelikog otpora.
- Kada parkirna kočnica ne dodiruje ili ne blokira kotač pravilno, slijedite gornje upute pomicanjem ručke u suprotnom smjeru.

### 4.5 POMOĆNE KOČNICE

Poluge kočnica nalaze se iza naslona, ispod oba ručka.

- Da biste zaustavili invalidska kolica, stisnite polugu kočnice. Za otpuštanje kočnice, otpustite poluge. Izvršite ovu aktivnost glatko i s odgovarajućom silom.
- Kočnice su opremljene parkirnim blokadama. Da biste ih koristili, stisnite ih i izvucite element za zaključavanje.

## 5. TEHNIČKI PODACI

### Težina

43 (22"): 10,64 kg

46 (16"): 10,24 kg

46 (22"): 10,94 kg

46 (24"): 11,18 kg

48 (22"): 11,14 kg

- Ukupna širina: 61 / 64 / 66 cm
- Dimenzije sjedala: 43 / 46 / 48 x 40 cm
- Ukupna dubina: 106 cm
- Ukupna visina: 92 cm
- Visina sjedala od tla: 50 cm
- Širina sklopljenog sjedala: 106 x 29 x 92 cm
- Maksimalna nosivost: 115 kg

## 6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovito održavajte komponente invalidskih kolica:

- Presvlake i jastuk mogu se čistiti vlažnom (ne mokrom) krpom i hladnom ili toplom vodom, bez upotrebe deterdženata. Tvrdokorne mrlje mogu se očistiti spužvom. Nemojte previše namakati presvlake. Osušite dalje od izvora topline.
- Plastične elemente treba čistiti vlažnom krpom, po mogućnosti uz upotrebu odgovarajućih deterdženata za plastične elemente. U tom slučaju slijedite upute proizvođača i sigurnosne mjere.

## 7. UVJETI SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

## 8. NAPOMENE

Timago International Group Ossowski Sp.k., kao i Orto i Medi centar d.o.o., ne snose odgovornost za neprimjereno korištenje Aktivna aluminijska kolica s velikim kotačima ACTIV TIM, nepoštivanje sigurnosnih propisa ili za korištenje suprotno namjeni.

## 9. INCIDENTI S MEDICINSKIM UREĐAJEM

Svaki ozbiljan incident koji uključuje medicinski uređaj mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj korisnik ili pacijent prebiva.

## 10. INFORMACIJE O JAMSTVU

Svi proizvodi koje distribuira naša tvrtka pokriveni su jamstvom, čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu dostupnom na našoj web stranici. Molimo kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Molimo imajte na umu da u svrhu jamstva treba sačuvati dokaz o kupnji (račun ili fakturu).

## 11. ODRŽAVANJE





Provoditi redovito održavanje tehničkog stanja sprave s pedalama:

- To je preporučeno do čist the pedala vježbač redovito s a mekom krpom i sapunicom. Nakon čišćenja, temeljito osušite vježbač s pedalama mekom tkanina.
- Ne koristite jaka sredstva za poliranje za čišćenje jer mogu oštetiti zaštitni premaz.
- U tijeku uklonite nečistoće s pokretnih elemenata trenažera osnova.

## 12. UVJETI SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA

Sprava ne smije biti izložena izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti, vode ili vlage.

## 13. OZNAKE

<b>REF</b>	Referentni broj		Proizvođač
<b>LOT</b>	Broj lota		Datum proizvodnje
<b>SN</b>	Serijski broj	<b>MD</b>	Medicinski proizvod
	Upozorenje		Pročitaj upute
<b>CE</b>	Proizvođač je izvršio ocjenu sukladnosti s relevantnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Proizvođač



TIMAGO.COM

Timago International Group Ossowski Sp.k.

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska  
T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: info@timago.com

Distributer:



Orto i Medi centar d.o.o.

specijalizirana prodavaonica  
Grižanska 6  
10 040 Zagreb

Tel 01/2911 366  
E-mail: [info@omc.hr](mailto:info@omc.hr)  
Webshop: [www.omc.hr](http://www.omc.hr)



## JAMSTVENI LIST

Jamstveni rok je 2 (dvije) godine od dana kupnje. Račun o kupnji je sastavni dio ovog jamstvenog lista. Sve neispravnosti na uređaju biti će uklonjene u jamstvenom roku.

Iz jamstva izuzeti su svi kvarovi i oštećenja nastala nepravilnim korištenjem uređaja, neodgovarajućim održavanjem, lošim skladištenje, mehanička oštećenja, ili neovlaštenih popravaka trećih osoba.

Jamstvo ne pokriva sastavne dijelove koji se istroše i ako oštećenja nastanu zbog uobičajene upotrebe proizvoda.

Za servis, dodatnu opremu i rezerve dijelove molim kontaktirati:

Orto i medi centar d.o.o.

Grižanska 6  
10040 Zagreb-Dubrava

tel.: 01/29 11 366

webshop: [www.omc.hr](http://www.omc.hr)e-pošta [info@omc.hr](mailto:info@omc.hr)

DATUM KUPNJE \_\_\_\_\_ BROJ RAČUNA \_\_\_\_\_

DATUM REKLAMACIJE \_\_\_\_\_ TV. BROJ \_\_\_\_\_

**Aktivna aluminijska kolica s velikim kotačima  
ACTIV TIM**

NAZIV UREĐAJA \_\_\_\_\_

OPIS KVARA - \_\_\_\_\_

REKLAMACIJE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Podaci o \_\_\_\_\_ Ime i prezime \_\_\_\_\_ Adresa \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Kupcu \_\_\_\_\_

Podnositelj reklamacije: \_\_\_\_\_ Orto i medi centar d.o.o.

(ime Prezime, potpis)

(Djelatnica ,potpis)

Napomena:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_