



## 1. OPIS

Lumbosakralna ortoza LumboTim plus s potpornim trakama izrađena je od elastične kompresijske tkanine koja se sprijeda pričvršćuje čičak. Sastoji se od fleksibilnih žica i aluminijskih nosača koji rasterećuju i stabiliziraju kralježnicu, te sustava zatezanja koji podešava silu stabilizacije. Zahvaljujući prostornoj strukturi kompresijske tkanine, ortoza je propusna za zrak i savršeno uklanja višak topline i vlage. Visina ortoze prikladna je za stabilizaciju torakalno-lumbosakralne kralježnice (LumboTim Plus).

Karakteristike proizvoda:

- elastična kompresijska tkanina
- savitljive žice
- nosači koji rasterećuju i stabiliziraju kralježnicu
- sustav zateznih traka kojima se podešava sila stabilizacije
- visina steznika je primjerena za stabilizaciju torakalno-lumbosakralne kralježnice

## 2. PRIMJENA

se koristi za smanjenje boli kod dekompresije korijena živaca, za lokalnu stabilizaciju kralježnice, kao i za jačanje tijekom vertikalizacije pacijenta koji pati od ortopedske ili neurološke ozljede. Zahvaljujući elastičnoj tkanini, materijal ima kompresijski učinak na mišiće unutar trupa.

Indikacije za uporabu:

- Diskopatija
- Spondilolisteza
- Upale zglobova kralježnice
- Bol zbog preopterećenja
- Degenerativne promjene
- Neuropatska i radikulopatija
- Pojačana i bolna stanja tonusa mišića leđa
- U procesu postoperativnog liječenja i rehabilitacije

## 3. KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučaju:

- Abrazija kože
- Ekcem
- Rane i druge ozljede kože
- Nakon nanošenja gela za zagrijavanje ili trljanja
- Pojedinačne kontraindikacije koje je utvrdio liječnik tijekom razgovora i fizikalnog pregleda proizvoda, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporaba.

## 4. UPUTE ZA POSTAVLJANJE

**Napomena!** Slijedite informacije sadržane u ovom priručniku tijekom postavljanja i podešavanja. Korisnici s jakim bolovima u lumbalnoj kralježnici i smanjenom pokretljivošću možda će trebati pomoć treće osobe koja ima odgovarajuće vještine.



- Da biste stavili ortožu, otkopčajte čičak i potporne trake koje se nalaze na prednjoj strani ortože. Omotajte trup od leđa prema naprijed u razini lumbosakralne kralježnice. Pričvrstite traku za stabilizaciju sprijeda i bočne potporne trake.
- Zapamtite da samo pravilno usklađena veličina jamči ispravnu stabilizaciju i olakšanje.

## 5. TEHNIČKI PODACI

VELIČINA	OPSEG TRUPA (cm)
S	75-85
M	85-95
L	95-105
XL	105-115
XXL	115-125
XXXL	125-140

## 6. ODRŽAVANJE

- Ručno pranje u toploj vodi na 30°C. Nemojte: sušiti u sušilici, klorirati, glačati, izbjeljivati, kemijski čistiti.
- Provjerite je li čičak pričvršćen kako ne biste uništili materijal.
- Sušite na sobnoj temperaturi daleko od intenzivnog izvora topline.

Napomena! Informacije o održavanju nalaze se na naljepnici materijala.






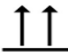







## 7. NAPOMENE

Timago International Group Ossowski Sp.k., kao i Orto i Medi centar d.o.o., ne snose odgovornost za neprimjereno korištenje pomagala ORTOZA TLSO - LUMBOTIM PLUS, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporaba.

## 8. INFORMACIJE O JAMSTVU

Opći uvjeti jamstava su navedeni na našim web stranicama, dok uvjeti jamstva su navedeni i opisani na jamstvenom listu u priritku. Imajte na umu da za jamstvene svrhe treba zadržati dokaz o kupnji (račun).

## 9. SIMBOLI

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Oprema klase II		Bilješke
	Pročitajte korisnički priručnik		Krhak
	Čuvati suho		Nastavi
	Referentni broj		Proizvođač
	Broj LOT-a		UDI kod
	Serijski broj		Medicinski uređaj
	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Proizvođač



TIMAGO.COM

Timago International Group Ossowski Sp.k.

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska  
T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: info@timago.com

Distributer:

ORTO I MEDI  
centar

Orto i Medi centar d.o.o.

specijalizirana prodavaonica  
Grižanska 6  
10 040 Zagreb

Tel 01/2911 366  
E-mail: [info@omc.hr](mailto:info@omc.hr)  
Webshop: [www.omc.hr](http://www.omc.hr)



## JAMSTVENI LIST

Jamstveni rok je 2 (dvije) godine od dana kupnja. Račun o kupnji je sastavni dio ovog jamstvenog lista. Sve neispravnosti na uređaju biti će uklonjene u jamstvenom roku.

Iz jamstva izuzeti su svi kvarovi i oštećenja nastala nepravilnim korištenjem uređaja, neodgovarajućim održavanjem, lošim skladištenje, mehanička oštećenja, ili neovlaštenih popravaka trećih osoba.

Za servis, dodatnu opremu i rezerve dijelove molim kontaktirajte:

Orto i medi centar d.o.o.

Grižanska 6  
10040 Zagreb-Dubrava

Tel.: 01/29 11 366

webshop: [www.omc.hr](http://www.omc.hr)e-mail: [info@omc.hr](mailto:info@omc.hr)

DATUM KUPNJE \_\_\_\_\_

BROJ RAČUNA \_\_\_\_\_

DATUM REKLAMACIJE \_\_\_\_\_

TV. BROJ \_\_\_\_\_

NAZIV UREĐAJA

TIMAGO ORTOZA TLSO - LUMBOTIM PLUS

OPIS KVARA -

REKLAMACIJE

---



---



---



---



---



---



---



---

Podaci o Kupcu

Ime i prezime \_\_\_\_\_ Adresa \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Podnositelj reklamacije:

Orto i medi centar d.o.o.

(ime Prezime, potpis)

(Djelatnica, potpis)

Napomena:

---



---